


Performance Tool Organizer

Features:

- Holds your large and specialty tools
- Made of durable, autoclavable, resin material
- Contains antimicrobial protection

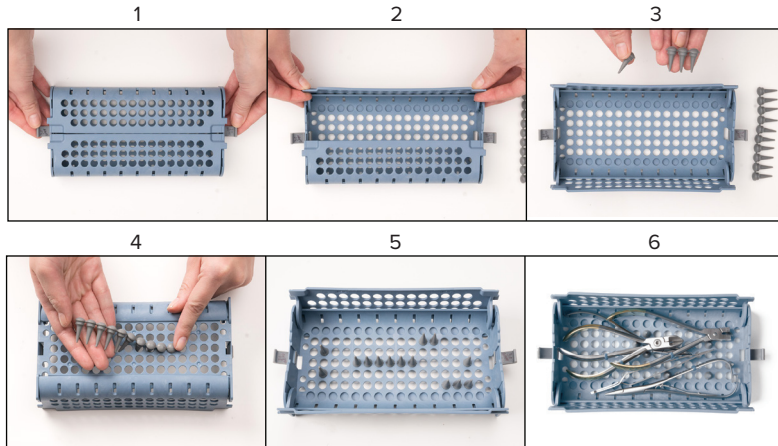

Processing of Resterilizable Medical Devices

- 1. Restriction of Reprocessing:** Frequent reprocessing has marginal consequences for Zirc products. Normally, the end of durability of the product will be determined by visual degradation.
- 2. Cleaning:** An Ultrasonic, Instrument Washer or Thermal Disinfector may be used. Follow manufacturer's directions for proper cleaning and use a mild alkaline detergent only. Rinse Zirc products with demineralized water to remove detergent or particles.
- 3. Packaging:** Bag or wrap product using sterilization pouch or sterilization wrap.
- 4. Sterilization:** Steam sterilize for at least 5 minutes at 273° F/134° C or 20 minutes at 250° F/121° C. Do not heat above 277° F/136° C. DO NOT dry heat sterilize. Do not allow organizer to touch side walls or bottom of sterilizer.

Wiederaufbereitung von sterilisierbaren Medizinprodukten

- 1. Einschränkungen der Wiederaufarbeitung:** Häufige Wiederaufbereitung hat nur geringfügige Auswirkungen auf Zirc Produkte. Normalerweise kann das Erreichen der Produkthaltbarkeitsgrenze durch sichtbare Veränderungen erkannt werden.
- 2. Reinigung:** Ultraschallbad oder Thermodesinfector können benutzt werden. Bitte die Herstellerhinweise für geeignete Reinigungsschritte beachten und nur mild alkaline Lösungen verwenden. Alle ZIRC Produkte anschliessend sorgfältig mit demineralisiertem Wasser spülen, um Rückstände zu entfernen.
- 3. Verpackung:** Das Produkt einschweißen oder eintüten, falls nötig.
- 4. Sterilisation:** Mindestens 5 Minuten bei einer Temperatur von 134° C (273° F) oder 20 Minuten bei einer Temperatur von 121° C (250° F) autoklavieren. Nicht über 136° C (277° F) sterilisieren. NIEMALS mit Heissluft sterilisieren. Achten Sie darauf, dass der Organizer die Wände und den Boden des Sterilisators nicht berührt.



Zirc Dental Products, Inc. 3918 Hwy 55 S.E. • Buffalo, Minnesota 55313 USA
+1 763-682-6636 | Fax: +1 763-682-6604 | www.zirc.com



Looser & Co. GmbH Benzstr. 1c, 51381 Leverkusen, Germany +49-2171-706670



50Z940LT REV C 01/22